

面罩说明书


使用方法

1. 把绑带的两头，穿入面罩的两个孔内，并粘好。



3. 把面罩戴在头上，如图所示
4. 把两个卡勾分别卡在面罩上
5. 调节卡勾处绑带的松紧


2. 把绑带的另两头，穿入两个卡勾.

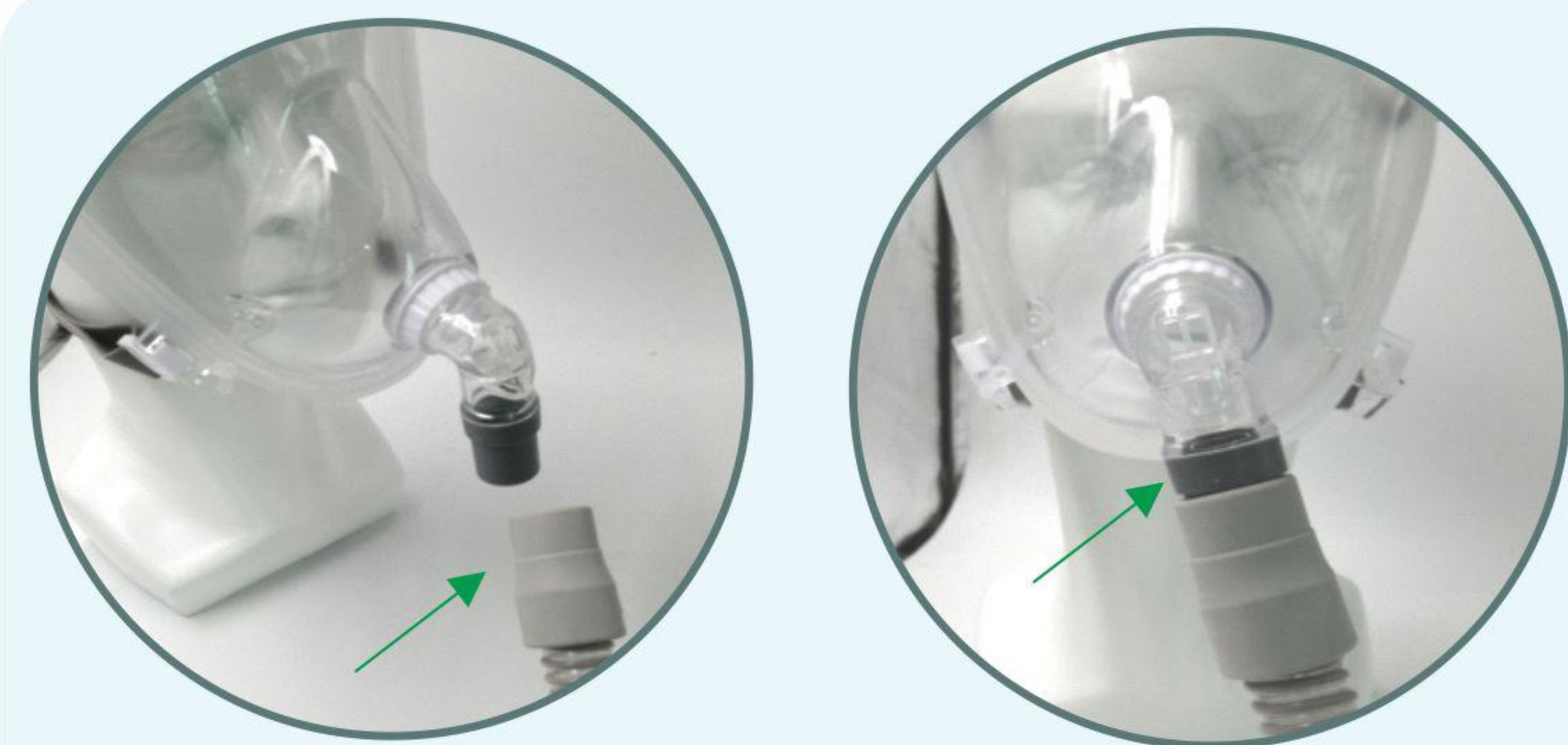

6. 弯管处连接呼吸回路



7. 弯管可以自由旋转，用户可根据需要呼吸回路的位置

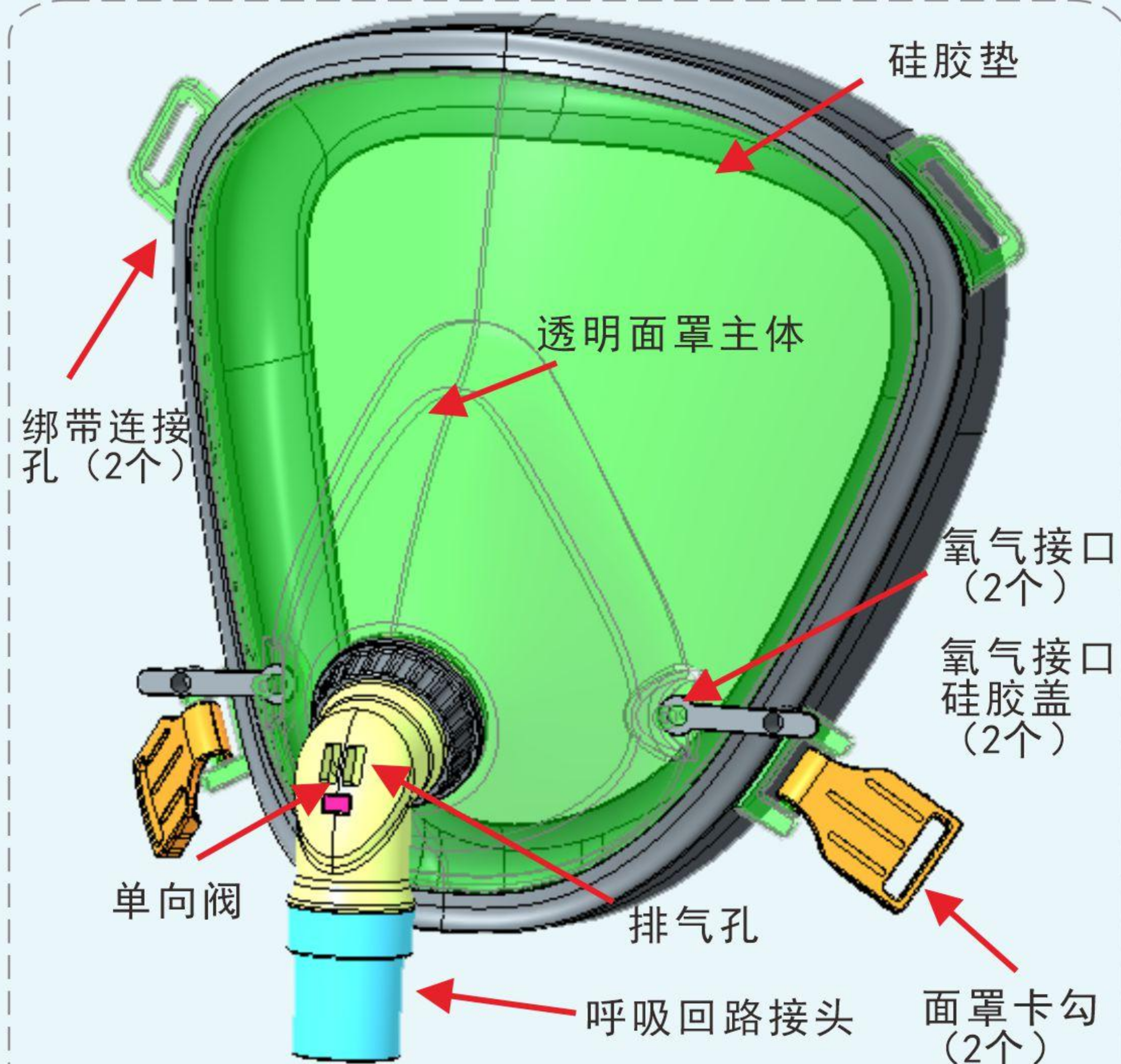


产品品牌：三文达

产品名称：面罩

产品型号：E-6001

产品规格：L号

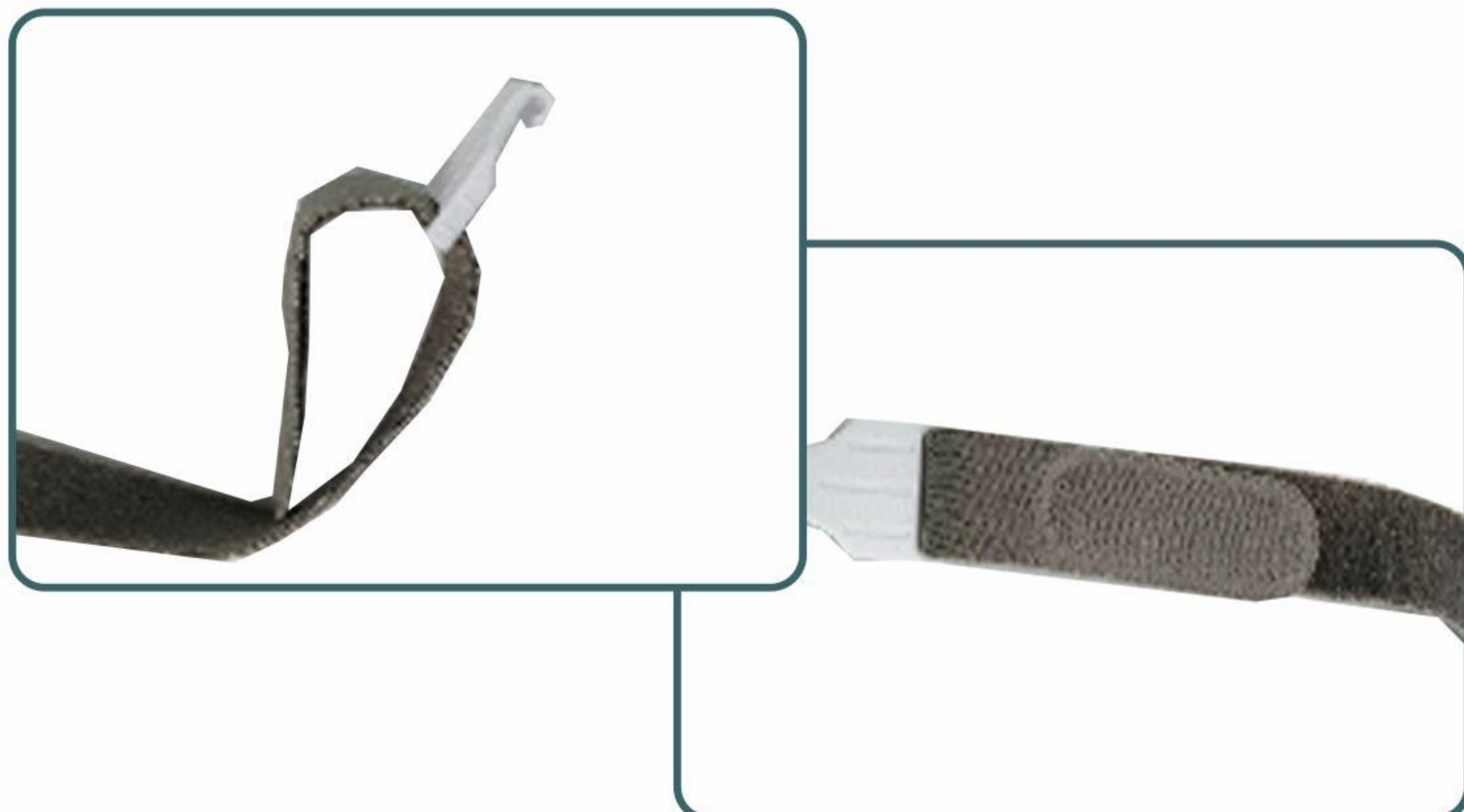

弯管的安装方法



3. 用红色辅助手柄在内侧顶住弯管，在外侧扣入弯管的卡槽内。



4. 由于固定圈装入其时贴好按一更顺。于的面推罩，后左旋右旋。



5. 也可用上图所示的固定圈，装入弯管后再弯。



1. 将弯管组件从面罩组件内侧穿入面罩的孔中。



2. 将固定圈从外侧套到弯管上，注意有平圈这侧朝内。